


Zelf een blauwdruk maken

Bedankt voor het bestellen van jouw unieke steunzolen! Om de steunzolen helemaal op jouw voetvorm aan te passen willen we je vragen om, m.b.v. de bijgeleverde Podotracks, van beide voeten een blauwdruk te maken. Een blauwdruk geeft ons veel informatie, zoals drukverdeling, voettype en stand van de voeten. Liever een instructievideo bekijken? Kijk dan op loopvisie.nl/online-steunzolen bij de veelgestelde vragen.

1.

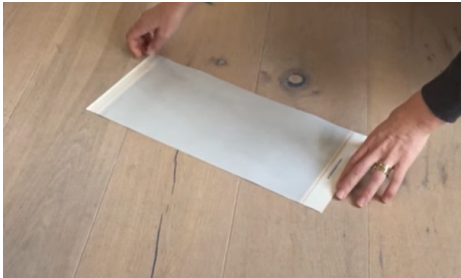

Haal de Podotracks uit de enveloppe en strijk de vouw in het midden vlak.

2.



Verwijder de witte folie. Let op! Zorg dat je het zwarte carbonpapier niet aanraakt!

3.



Plaats de doorzichtige folie weer rustig terug op het carbonpapier.

4.




Plaats eerst je ene voet naast de Podotrack en ga met je andere voet evenwijdig en in het midden van de Podotrack staan. Verdeel je gewicht over beide voeten. LET OP! Zorg dat je in een keer goed staat.

5.



Maak met een pen of potlood een omtrek van je voet. Je kunt ook aan iemand hulp vragen om de omtrek te maken.

6.

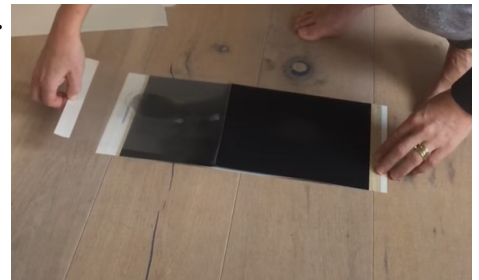

Stap van de Podotrack af door je voet recht omhoog te tillen. Trek de doorzichtige folie rustig los van het carbonpapier.

7.



Verwijder het carbonpapier. LET OP! Dit kan afgeven.

8.



Rol de doorzichtige folie met je voetafdruk terug op het papier en druk de folie goed aan.

9.



Klaar! Herhaal de stappen nu voor je andere voet.

Uploaden of opsturen

Leg beide blauwdrukken naast elkaar en maak hier een duidelijke foto van. Zorg dat er geen andere dingen op de foto te zien zijn. Upload jouw foto op loopvisie.nl/blauwdruk. Zodra je dit hebt gedaan, gaan wij direct aan de slag en ontvang je jouw op maat gemaakte steunzolen binnen 5 werkdagen thuis.

Vind je het uploaden van de foto lastig? Je kunt jouw blauwdrukken ook opsturen naar Loopvisie B.V. in Lelystad. Vergeet dan niet je naam en ordernummer te vermelden op de achterkant van beide blauwdrukken.



Loopvisie B.V.
Zaanstraat 6b
8226 ND Lelystad

0320 - 218064
info@loopvisie.nl
www.loopvisie.nl

